



# Masque de protection DELEP MASK UNS1

## Masque de protection lavable et réutilisable

Matière certifiée Oeko-tex



Confort et douceur

Filtration garantie  
100 lavages  
(tests en cours pour  
120 lavages à l'IFTH)

Un maintien  
doux souple et confortable

Rapport qualité/prix  
optimisé

Design  
simple et discret

Set de 2 masques  
(2x 4heures)

Masque de Catégorie 1 UNS1

Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public  
(suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020)

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de l'IFTH  
et qui supporte 100 lavages (rapport 2020-06-10-001-100)  
(Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020)  
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Département Santé/Healthcare  
Produit DELEP MASK UNS1  
Référence NEGOC-013639  
Dimensions Taille Adulte (disponible en taille enfant)  
Composition Jersey 57% coton/ 38% Polyester/ 5% Elasthane



Conditionnement Set de 2 masques UNS-1  
carton 59x39x30cm 400 sets par carton (800 masques)  
palette 120x80cm 24 cartons par palette (19200 masques)

Préconisations d'entretien



laver une première fois avant toute première utilisation



**DELEP MASK UNS1**  
**AFNOR SPEC S76-001:2020**  
28/04/2020

## Masque de protection DELEP MASK UNS1

### Masque de protection lavable et réutilisable réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires catégorie 1 suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020

#### Domaine d'utilisation

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

#### Performances

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de l'IFTH, 93 chemin des Mouilles 69130 ECULLY, et qui supporte 100 lavages (rapport 2020-06-10-001-100)

Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa

#### Utilisation

le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

#### Recommandations de manipulation des masques

Voir Conseils au dos

#### Entretien du masque

après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour.

Composition de la matière principale : 57% coton/ 38% Polyester/ 5% Elasthane

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

#### Sécurité

Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.

La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m<sup>2</sup>.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

#### Avertissement

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

**Le temps de port préconisé du  
masque  
est limité à 4h.**

**Laver une première fois avant  
utilisation.**





**DELEP MASK UNS1**  
**AFNOR SPEC S76-001:2020**  
28/04/2020

## COMMENT PORTER LE MASQUE ?

### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.

Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.

Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.

Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.

Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.



### Avant de le mettre

Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.

Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.

Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.



### Pour le mettre

Tenez le masque par les lanières élastiques.

Placez-le au niveau de votre bouche.

Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.


Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale (selon le modèle de masque)



### Lorsque vous le portez

Évitez de le toucher et de le déplacer.

Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

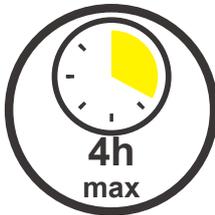

### Il faut changer le masque

Quand vous avez porté le masque 4h.

Quand vous souhaitez boire ou manger.

Quand il devient difficile de respirer.

Si le masque est humidifié.

Si le masque est endommagé.

Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.



### Pour l'enlever

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.

En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.

Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.

Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

## COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

### Avant ouverture

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

### Pour le lavage

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.

Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

Ce masque a été testé pour 100 lavages. Après 100 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.

Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale (selon le modèle) et en reformant les plis sans forcer.

### Après le lavage

Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches

Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.

Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.

Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).